

Movadol

Descrição

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos.

Campo de aplicação

Movadol tem aplicação em hospitais e clínicas, na desinfecção de superfícies fixas (tais como piso, paredes, bancadas e portas) e na desinfecção de artigos não críticos.

Finalidade

Movadol é um bactericida catiônico eficaz na remoção de sujeira de origem animal e vegetal.

Vantagens

- Sistema fechado de diluição do produto concentrado;
- Alto poder desengordurante.
- Fácil enxaguamento e baixo poder espumante.
- Melhor ação anti-fúngica e anti-microbiana.
- Maior tolerância à água dura e matéria orgânica.

Modo de usar

- **Para limpeza geral:** Usar o produto diluído até 1:100 (diluir 10 mL de produto/litro de água).
- **Para desinfecção de superfícies fixas:** Lavar, enxaguar e secar a superfície. Usar o produto diluído na proporção de 1:20 (diluir 50 mL de produto/litro de água). Aplicar o produto deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.
- **Para desinfecção de artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Usar o produto diluído na proporção de 1:20 (diluir 50 mL de produto/litro de água). Imergi-los na solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.



Cod

72644

NCM

38089429

Embalagem

Bombona de 20 L

Validade

12 meses a partir da data de fabricação.

Características

Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Azul, claro

Odor: Inodoro

pH 100%: 6,0 – 9,0

Densidade (20°C): 0,99 – 1,01 g/cm³

Químicas

Cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio/cloreto de didicildimetil amônio, Alcool graxo etoxilado, Corante e Veículo.

Precauções

Não é necessário o uso e EPI em diluições indicadas de uso.